

## LIFECLEAN DESINFEKTION

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Färdigblandad lösning för rengöring och desinfektion av ytor med bevisad effekt på bakterier, virus, svamp och sporer.

#### Effektiv mot

Vegetativa bakterier, virus, svamp, mykobakterier (t.ex. TB) inom 1 minut och endosporer, t.ex. *Clostridium difficile* och *Bacillus subtilis* inom 2 minuter.

#### Redo att användas

LifeClean är färdigblandad och redo att användas direkt från flaskan. Detta säkerställer att blandningen alltid har den tänkta koncentrationen och är enkel att använda.

#### Innehåll

ClO<sub>2</sub>  
pH

Nominell 200 ppm  
Sur vattenlösning

#### Metod för desinfektion av ytor

i enlighet med gällande lokala föreskrifter:

Ytor	Städredskap
<b>1</b> Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade kemikalier från tänkt appliceringsyta.	<b>1</b> Rengör redskapet i förväg, avlägsna synliga föroreningar.
<b>2</b> Applicera generöst med LifeClean på en ren trasa och torka avsedd yta. Verkningsstid inom 2 minuter.	<b>2</b> Lägg redskapet i en behållare fylld med LifeClean lösningen.
<b>3</b> Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om materialkompatibilitet med desinfektionslösningen. Följ alltid dom lokala rutinerna.	<b>3</b> Verkningsstid inom 2 minuter.
<b>4</b> Regelbunden avsköljning av ytor med vatten rekommenderas.	<b>4</b> Rengörs, sköljs och torkas av väl.
<b>5</b> Följ dom lokala riktlinjerna för personligt skydd.	<b>För information om personlig hantering, stabilitet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.</b>
<b>6</b> Stäng öppnad flaska och märk med öppningsdag. Öppnad flaska hållbar 4 veckor från öppningsdag.	
<b>7</b> Överskottsvätska kan hällas i avloppet, tömd flaska lämnas till återvinning. Användning av LifeClean Desinfektion anses inte som hälso- eller miljöfarligt enligt gällande riktlinjer.	